

Bruksanvisning for Hjertestarter-Skap



Vårt hjertestarterskap er designet for å være kompatibelt med de fleste hjertestartermodeller på markedet. Det tilbyr en universell løsning for trygg oppbevaring av hjertestarteren. Skapet er laget av høykvalitets aluminium, som gir en lettvektsfølelse samtidig som det sikrer holdbarhet og beskyttelse mot vær og vind. Den vanntette egenskapen gjør skapet ideelt for alle miljøer, enten det er plassert innendørs i et kontorbygg eller utendørs på en skolegård.

Sikker Oppbevaring med Umiddelbar Tilgang

Skapet er designet for å gi optimal beskyttelse og tilgjengelighet for din hjertestarter. Enten det er for bruk innendørs eller utendørs, sikrer dette skapet at hjertestarteren er trygt oppbevart og klar til bruk i nødstilfeller.

Innovativ Alarmfunksjon

Skapet er konstruert av robust metall og er utstyrt med en integrert, batteridrevet alarm. Når skapdøren åpnes, utløses et blinkende lys som umiddelbart varsler omgivelsene. For miljøer der en diskret tilnærming er foretrukket, kan alarmfunksjonen enkelt deaktiveres. For å aktivere eller deaktivere alarmen, benytt bryteren som er montert "oppunder taket" på skapet (se bilde).



For å aktivere eller deaktivere alarmen, benytt bryteren som er montert "oppunder taket" på skapet



Med de medfølgende skruene og tre forhåndsborrede hull på baksiden, kan skapet raskt og sikkert festes til enhver vegg.

Enkel og Sikker Montering

Montering av skapet er en problemfri prosess. Med de medfølgende skruene og tre forhåndsborrede hull på baksiden, kan skapet raskt og sikkert festes til enhver vegg.

Låsbar Dør med Sikkerhetsanbefaling

For å beskytte mot uautorisert tilgang, leveres skapet med en lås. Imidlertid, for å sikre at hjertestarteren er tilgjengelig i en nødsituasjon, anbefaler vi at skapet ikke låses. Dette sikrer at førstehjelpere har umiddelbar tilgang når hvert sekund teller.

